

ORAL MICROBIOTA CHECK (OMC)

KID

Contenu :

- ◆ 1 seringue stérile
- ◆ 1 tube pour le prélèvement stérile
- ◆ 1 formulaire de prescription
- ◆ 1 enveloppe de retour
- ◆ 1 notice – mode opératoire

Analyses réalisées :

Liste des bactéries recherchées et quantifiées par PCR :

- ◆ Flore totale
- ◆ *Lactobacillus spp.*
- ◆ *Streptococcus mutans*

Pour la mesure de la capacité tampon de la salive au fauteuil, utiliser un kit dédié (*saliva-check buffer GC/ Dentobuff strip / CRT® Buffer test*)

Précautions :

Ne pas utiliser le kit de prélèvement en cas de dégradation, de contamination, de fuite, d'ouverture des emballages ou de tout autre signe de détérioration.

Ne pas utiliser le kit de prélèvement au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Ne pas autoclaver.

Porter des gants stériles et des vêtements de protection lors du prélèvement et de la manipulation d'échantillons microbiologiques.

Ne pas boire, ne pas manger, ne pas se laver les dents ou se rincer la bouche, 1 heure avant le prélèvement.

Mode de prélèvement :

- Recueillir la salive du patient dans le tube de prélèvement (2 ml de salive non stimulée). La seringue fournie est utilisée pour recueillir la salive dans la bouche par aspiration. Bien refermer le tube. **(Fig.A)**
- Remplir le formulaire de prescription . **(Fig.B)**
- Insérer le tube de prélèvement **identifié** (NOM, Prénom, DDN) et le formulaire de prescription dans l'enveloppe fournie et l'expédier au laboratoire (affranchir lettre internationale). **(Fig.C)**



Fig.A



Fig.B



Fig.C

Expédition :

Expédier par la poste le prélèvement + fiche + chèque bancaire à l'ordre d'Espace lab (ou preuve de pré-paiement par carte bancaire ou paypal) à :

Espace Lab, 36 rue de Lausanne, 1201 Genève, Suisse.

Affranchir au tarif postal lettre internationale standard Monde (1,65 euro) ou 2 timbres rouges lettre prioritaire pour un acheminement rapide (inférieur à 72 heures).

	Consulter la notice d'utilisation	LOT	Code de lot
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		A utiliser jusqu'au

Fabriqué et distribué par :

ESPACE LAB Sa, 36 rue de Lausanne, 1201 Genève – SUISSE

Publication : Août 2022