

## ORAL MICROBIOTA CHECK (OMC)

Kit de prélèvement pour test microbiologique parodontal

### BASIC+, PLATINIUM, VIRAL+

#### Contenu :

- ◆ Des pointes de papier stériles
- ◆ 1 microtube pour le prélèvement stérile
- ◆ 1 formulaire de prescription
- ◆ 1 enveloppe de retour
- ◆ 1 notice – mode opératoire

#### Analyses réalisées :

- ◆ **OMC BASIC + :**  
- Flore totale, Aa, Pg, Tf, Td, Pi, Ca
- ◆ **OMC PLATINIUM :**  
- Flore totale, Aa, Pg, Tf, Td, Pi, Pm, Fn, Cr, Ec, Ca
- ◆ **OMC VIRAL + :**  
- Entamoeba spp., EBV, CMV, HSV-1/2

#### Nature du site de prélèvement :


Le prélèvement sur site à fort saignement et /ou suppuration doit être évité, les bactéries se trouvant diluées et l'apport de liquide (sang ou suppuration) limitant la capacité d'absorption des pointes de papier stériles  
*Dans le cas de chirurgie et abcès, si interrogations, vous pouvez prendre contact avec le laboratoire, si vous avez besoin de précision concernant le prélèvement.*

#### Mode de prélèvement :

Le prélèvement par site permet une identification des agents pathogènes distincts ainsi qu'une quantification des germes d'une même poche parodontale.

Le prélèvement poolé ou multi-sites renseigne sur le niveau de contamination bactérienne, l'état parodontal et facilite le monitoring du traitement . Dans cette situation, jusqu'à 10 pointes de papier stériles peuvent être introduites dans les différentes poches parodontales et introduites dans le microtube.

- Enlever la plaque supra gingivale puis isoler le site de prélèvement à l'aide de mèches de coton stériles.
- Insérer la pointe de papier stérile dans la poche parodontale à l'aide de pinces, laisser au contact 15 secondes (**Fig.A**)
- Utiliser plusieurs pointes de papier stériles pour épuiser la poche parodontale
- Placer la ou les pointes dans le microtube (**Fig.B**)
- Remplir le formulaire de prescription (**Fig.C**)
- Le prélèvement terminé, **identifier le tube** (NOM, Prénom, DDN) et retourner le microtube contenant l'échantillon au laboratoire dans l'enveloppe prévue à cet effet (**Fig.D**)

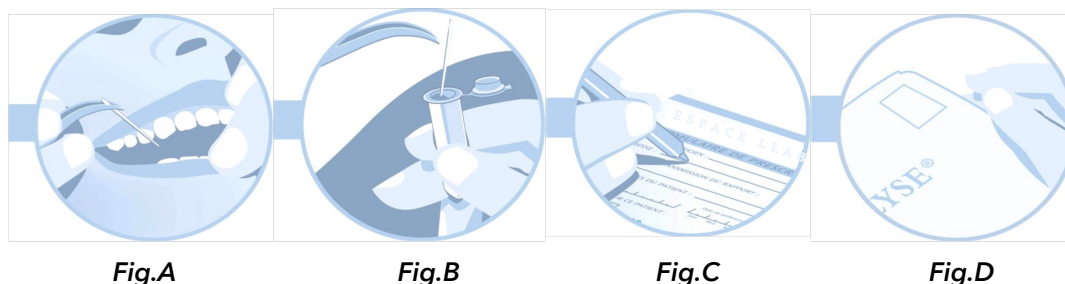

#### Expédition :

Expédier par la poste le prélèvement + fiche + chèque bancaire à l'ordre d'Espace lab (ou preuve de pré-paiement par carte bancaire ou paypal) à :

**Espace Lab, 36 rue de Lausanne, 1201 Genève, Suisse.**

Affranchir au tarif postal lettre internationale standard Monde (1,65 euro) ou 2 timbres rouges lettre prioritaire pour un acheminement rapide (inférieur à 72 heures).

	Consulter la notice d'utilisation		Code de lot
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		A utiliser jusqu'à

Fabriqué et distribué par :

ESPACE LAB Sa, 36 rue de Lausanne, 1201 Genève – SUISSE

Publication : Août 2022

Notice retrouvable via QR code sur la fiche de prescription ou sur notre site internet : [www.espace-lab.pro/protocoles](http://www.espace-lab.pro/protocoles)